

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

Το βασικό μέλημα της Genekor είναι τα δείγματα που παραλαμβάνονται να είναι τα κατάλληλα για την ανάλυση που έχει ζητηθεί, να συσκευάζονται και να αποστέλλονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο σκοπός της λίστας αυτής είναι να πετύχουμε ακριβώς αυτό. Για τυχόν ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ Ή 4-6 ΠΛΑΚΙΔΙΑ (+ΠΛΑΚΙΔΙΟ Η&Ε)

Στην περίπτωση που στείλετε ιστό, θα πρέπει να είναι μονιμοποιημένος σε φορμαλίνη και εγκλεισμένος σε μπλοκ παραφίνης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε αχρωμάτιστες τομές παραφίνης επιστρωμένες σε αντικειμενοφόρα πλακίδια (στεγνωμένα στον αέρα, όχι σε κλίβανο) συμπεριλαμβανομένου και ενός πλακιδίου με χρώση Αιματοξυλίνης Ηωσίνης (H&E staining). Εάν στείλετε βιοψία πυρήνα, χρησιμοποιήστε 3-5 πυρήνες ευθυγραμμισμένους και ενσωματωμένους σε ένα μόνο μπλοκ, τοποθετημένους έτσι ώστε όταν τεμαχίζεται η λεπίδα να πηγαίνει παράλληλα με τον επιμήκη άξονα των πυρήνων.


1. Για δοκιμή ALK-FISH χρειάζομαστε τομές πάχους 2-3μm. Για όλες τις άλλες δοκιμές χρειάζομαστε τομές πάχους 5-10μm.



ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

20%

Τουλάχιστον το 20% του δείγματος θα πρέπει να περιέχει καρκινικά κύτταρα, για την απομόνωση ικανοποιητικής ποσότητας καρκινικού γενετικού υλικού.

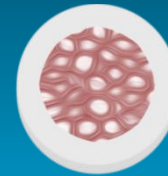

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ:
Τουλάχιστον το 40% του δείγματος θα πρέπει να περιέχει καρκινικά κύτταρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit (η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έρχεται απευθείας σε επαφή με το δείγμα).

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της Genekor και όλα τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του ασθενή στο Genekor Specimen Kit.

2. Τοποθετήστε το δείγμα στο Genekor Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης Genekor και των σχετικών εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά έγγραφα) στη συσκευασία που διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλετε το ολοκληρωμένο Genekor Specimen Kit (έντυπο αίτησης ασφαλιστικά στοιχεία και δείγματα) στη διεύθυνση:

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα

Τοποθετήστε όλα τα μέρη του δείγματος (έντυπο στοιχεία και δείγματα) στο Genekor Specimen Kit και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την παραλαβή του δείγματος.

www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138** για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε Genekor Specimen Kits.

info@genekor.com

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

Το βασικό μέλημα της Genekor είναι η συνολική μάζα των κυττάρων που υποβάλλεται να είναι επαρκής για την εξαγωγή της ποσότητας DNA που είναι απαραίτητη για την ανάλυση. Αυτή η λίστα ελέγχου σχεδιάστηκε για να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε ώστε να προσδιορίσουμε το καλύτερο δείγμα για κάθε ασθενή. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια που διατίθενται από την Genekor (φιαλίδια Cell-Free DNA ή/και RNA BCT®). Η συλλογή αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η Genekor δεν λαμβάνει αίμα στις εγκαταστάσεις της ή σε άλλη τοποθεσία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Γεμίστε το φιαλίδιο τελείως (10 ml)
2. Δεδομένου ότι τα φιαλίδια Cell-Free DNA/RNA BCT® περιέχουν χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή από το φιαλίδιο.
3. Αναμειξτε αμέσως ανακινώντας ελαφρά 8 με 10 φορές. Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή απόδοση του προϊόντος.
4. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί έως 7 ημέρες, σε θερμοκρασία από 6-37°C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ το δείγμα.

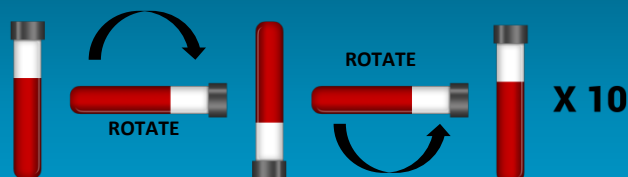

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit (η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έρχεται απευθείας σε επαφή με το δείγμα).

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της Genekor και όλα τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του ασθενή στο Genekor Specimen Kit.

2. Τοποθετήστε το δείγμα στο Genekor Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης Genekor και των σχετικών εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά έγγραφα) στη συσκευασία που διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλτε το ολοκληρωμένο Genekor Specimen Kit (έντυπο αίτησης ασφαλιστικά στοιχεία και δείγματα) στη διεύθυνση:

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα

Τοποθετήστε όλα τα μέρη του δείγματος (έντυπο στοιχεία και δείγματα) στο Genekor Specimen Kit και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την παραλαβή του δείγματος.

* ΠΡΟΣΟΧΗ, φιαλίδια που δεν φέρουν το ονοματεπώνυμο ή/και τον κωδικό του εξεταζόμενου ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά.

www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138** για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε Genekor Specimen Kits.

info@genekor.com