

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δειγματοληψία υγρής βιοψίας, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια που διατίθενται από την Genekor (φιαλίδια Cell-Free DNA ή/και RNA BCT®). Η συλλογή αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η Genekor δεν λαμβάνει αίμα στις εγκαταστάσεις της ή σε άλλη τοποθεσία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Γεμίστε το φιαλίδιο τελείως (10 ml)
2. Δεδομένου ότι τα φιαλίδια Cell-Free DNA/RNA BCT® περιέχουν χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή από το φιαλίδιο.
3. Αναμειξτε αμέσως ανακινώντας ελαφρά 8 με 10 φορές. Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή απόδοση του προϊόντος.
4. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί έως 7 ημέρες, σε θερμοκρασία από 6-25°C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ το δείγμα.

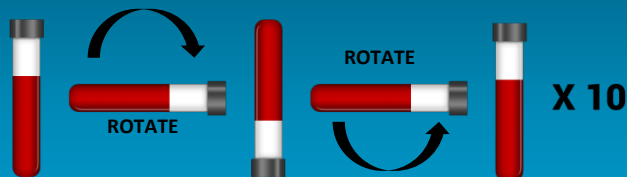

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit (η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έρχεται απευθείας σε επαφή με το δείγμα).

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της Genekor και όλα τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του ασθενή στο Genekor Specimen Kit.

2. Τοποθετήστε το δείγμα στο Genekor Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης Genekor και των σχετικών εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά έγγραφα) στη συσκευασία που διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλτε το ολοκληρωμένο Genekor Specimen Kit (έντυπο αίτησης ασφαλιστικά στοιχεία και δείγματα) στη διεύθυνση:

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα

Τοποθετήστε όλα τα μέρη του δείγματος (έντυπο στοιχεία και δείγματα) στο Genekor Specimen Kit και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την παραλαβή του δείγματος.

* ΠΡΟΣΟΧΗ, φιαλίδια που δεν φέρουν το ονοματεπώνυμο ή/και τον κωδικό του εξεταζόμενου ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά.

www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138** για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε Genekor Specimen Kits.

info@genekor.com